

Wie Sie Ihre Schermaschine richtig pflegen und reinigen

ZIELSETZUNG UND WIRKUNG

Die richtige Pflege, Wartung und Reinigung der Schermaschine gewährleistet, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und ein perfektes Schurergebnis ermöglicht. Das verlängert sowohl die Nutzungsdauer der Schermesser als auch die Lebensdauer der gesamten innenliegenden Elektronik wie Kabel, Motor, Akku.



DIE PASSENDE SCHERMASCHINE FÜR IHR TIER

Wählen Sie zur Fellschur **die passende Schermaschine für Ihr Tier**. Informieren Sie sich beim Hersteller, welche er anbietet inklusive der zugehörigen Scherköpfe. So wird ein perfektes Schurergebnis erreicht, da die Schermesser optimal auf das jeweilige Fell des Tieres abgestimmt sind.



REGELMÄSSIGES ÖLEN, REINIGEN UND PFLEGEN

Befreien Sie nach jedem Gebrauch den Scherkopf von Haaren und Schmutz mit dem beiliegenden Bürstchen. **Ölen Sie die Schermesser vor und während des Gebrauchs** mit hochwertigem Schermaschinenöl, um die Schermesser geschmeidig zu halten und ein Heißlaufen zu vermeiden. Lassen Sie dabei die Maschine einige Sekunden im Leerlauf laufen, damit sich das Öl gut verteilen kann. Eine Ölung sollte **alle 5-10 Minuten** während der Nutzung vorgenommen werden.



KLINGEN NACHSCHÄRFEN ODER AUSTAUSCHEN

Die Abnutzung der Schermesser ist abhängig vom Staub- und Verschmutzungsgrad des Fells. Bei intensiver Nutzung der Schermaschine ist ein **Nachschärfen meist nach 3-5 Schuren** notwendig. Lassen sie diese stets von einem Fachmann durchführen. Informieren Sie sich vor dem Kauf, ob die Schermesser zum Nachschleifen geeignet sind.



MOTORÜBERPRÜFUNG

Bei Schermaschinen, die über **Kohlebürsten** verfügen, müssen diese regelmäßig erneuert werden. Haben sie die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge erreicht, sollten diese ersetzt werden, um den Motor der Schermaschine nicht zu beschädigen.



DIE ÜBERPRÜFUNG DER ELEKTRIK

Überprüfen Sie **alle sichtbaren elektrischen Teile** auf Beschädigungen – auch bei einem Neukauf. Kontrollieren Sie das Netzkabel auf Risse, Löcher oder Schnitte, den Ein-Ausschalter auf seine Funktionalität und den Akku auf seinen Ladestand.



SCHERMASCHINE REGELMÄSSIG WARTEN

Auch bei sehr guter Pflege ist es empfehlenswert, die Schermaschine etwa **alle 2 Jahre** warten zu lassen. Abgenutzte Teile werden dann bei Bedarf ersetzt, das Innere der Maschine wird gereinigt und verschiedene Bauteile geölt und gefettet. Das verlängert erheblich die Lebensdauer Ihrer Schermaschine.



DIE RICHTIGE LAGERUNG DER SCHERMASCHINE

Lagern Sie Ihre Schermaschine bei Nichtgebrauch stets trocken in einer **staub- und schmutzgeschützten Box bis zur nächsten Nutzung**. Es ist ratsam, die Einstellschraube vorher zu lösen und den Scherkopf in geöltes Papier einzuwickeln, um ein Rosten der Klinge zu verhindern.

Vorbeugende Maßnahmen



Um Ihre Schermaschine bereits ab der ersten Nutzung vor Blockaden und möglichen Funktionsstörungen zu schützen, können Sie folgende Präventivmaßnahmen durchführen:

- 1 Befreien Sie Ihre Schermaschine nach jedem Gebrauch von Haaren und Schmutz.
- 2 Verwenden Sie **nur hochwertige Scherköpfe** und ersetzen Sie sie regelmäßig oder lassen Sie diese von einem Fachmann nachschleifen.
- 3 Ölen Sie die Scherköpfe vor und während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktionieren.
- 4 **Vermeiden Sie Überhitzung** der Maschine durch längeres Arbeiten ohne Unterbrechung.
- 5 Trocknen Sie das Fell des Tiers vor der Schur und befreien Sie es von grobem Schmutz, da nasse oder schmutzige Haare zu Blockaden in der Maschine führen können und die Scherleistung beeinträchtigen.

Die richtige Pflege der Schermaschine

- Reinigung der Schermaschine: nach jedem Gebrauch, Haare und Schmutz entfernen
- Ölen der Scherköpfe: vor und während der Nutzung
- Klängen regelmäßig nachschärfen
- Korrekte Lagerung der Schermaschine: vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützen; Schermesser separat in geöltem Papier bis zur nächsten Nutzung aufbewahren
- Regelmäßige Wartung durchführen lassen
- Akkupflege: den Akku regelmäßig aufladen und Schermaschine nicht während des Ladens (kabelgebundenes Aufladen) benutzen
- Transport der Schermaschine: in eine geeignete Aufbewahrungsbox legen, um Beschädigungen zu vermeiden
- Reparaturen stets von einem Fachmann durchführen lassen

